

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Bandagem

Nome Comercial: **Cohesive Bandage**

Modelos: CO03809BKR; CO03809EBR; CO03809BGR; CO03809RBR; CO03809RDR;
 CO03809XXR; CO05009BKR; CO05009EBR; CO05009ORR; CO05009BGR;
 CO05009RBR; CO05009PPR; CO05009YWR; CO05009CGR; CO05009RDR;
 CO05009PKR; CO05009LMR; CO05009CBR; CO05009NBR; CO05009FGR;
 CO05009SBR; CO05009GDR; CO05009XXR; CO05009BKC; CO05009EBC;
 CO05009ORC; CO05009BGC; CO05009RBC; CO05009PPC; CO05009YWC;
 CO05009CGC; CO05009RDC; CO05009PKC; CO05009LMC; CO05009CBC;
 CO05009NBC; CO05009FGC; CO05009SBC; CO05009GDC; CO05009XXC;
 CO05045BKP; CO05045RBP; CO05045RDP; CO05045BGP; CO07545BKP;
 CO07545RBP; CO07545RDP; CO07545BGP; CO10045BKP; CO10045RBP;
 CO10045RDP; CO10045BGP; CO05005WTP; CO05005EMP; CO07505WTP;
 CO07505EMP; CO10005WTP; CO10005EMP; CO07509BKR; CO07509EBR;
 CO07509ORR; CO07509BGR; CO07509RBR; CO07509PPR; CO07509YWR;
 CO07509CGR; CO07509RDR; CO07509PKR; CO07509LMR; CO07509CBR;
 CO07509NBR; CO07509FGR; CO07509SBR; CO07509GDR; CO07509XXR;
 CO07509BKC; CO07509EBC; CO07509ORC; CO07509BGC; CO07509RBC;
 CO07509PPC; CO07509YWC; CO07509CGC; CO07509RDC; CO07509PKC;
 CO07509LMC; CO07509CBC; CO07509NBR; CO07509FGR; CO07509SBR;
 CO07509GDR; CO07509XXC; CO02505BKB; CO02505EBB; CO02505ORB;
 CO02505BGB; CO02505RBB; CO02505PPB; CO02505YWB; CO02505CGB;
 CO02505RDB; CO02505PKB; CO02505LMB; CO02505CBB; CO02505NBB;
 CO02505FGB; CO02505SBB; CO02505GDB; CO02505XXB; CO05005BKB;
 CO05005EBB; CO05005ORB; CO05005BGB; CO05005RBB; CO05005PPB;
 CO05005YWB; CO05005CGB; CO05005RDB; CO05005PKB; CO05005LMB;
 CO05005CBB; CO05005NBB; CO05005FGB; CO05005SBB; CO05005GDB;
 CO05005XXB; CO2PK07509BKR; CO2PK07509EBR; CO2PK07509ORR;
 CO2PK07509BGR; CO2PK07509RBR; CO2PK07509PPR; CO2PK07509YWR;
 CO2PK07509CGR; CO2PK07509RDR; CO2PK07509PKR; CO2PK07509LMR;
 CO2PK07509CBR; CO2PK07509NBR; CO2PK07509FGR; CO2PK07509SBR;
 CO2PK07509GDR; CO2PK07509XXR; CO02505BKP; CO02505EBP; CO02505ORP;
 CO02505BGP; CO02505RBP; CO02505PPP; CO02505YWP; CO02505CGP;
 CO02505RDP; CO02505PKP; CO02505LMP; CO02505CBP; CO02505NBP;
 CO02505FGP; CO02505SBP; CO02505GDP; CO02505XXP; CO05005BKP; CO05005EBP;
 CO05005ORP; CO05005BGP; CO05005RBP; CO05005PPP; CO05005YWP;
 CO05005CGP; CO05005RDP; CO05005PKP; CO05005LMP; CO05005CBP;
 CO05005NBP; CO05005FGP; CO05005SBP; CO05005GDP; CO05005XXP;
 CO07505BKP; CO07505EBP; CO07505ORP; CO07505BGP; CO07505RBP;
 CO07505PPP; CO07505YWP; CO07505CGP; CO07505RDP; CO07505PKP;
 CO07505LMP; CO07505CBP; CO07505NBP; CO07505FGP; CO07505SBP;
 CO07505GDP; CO07505XXP; CO10005BKP; CO10005EBP; CO10005ORP;
 CO10005BGP; CO10005RBP; CO10005PPP; CO10005YWP; CO10005CGP;
 CO10005RDP; CO10005PKP; CO10005LMP; CO10005CBP; CO10005NBP;
 CO10005FGP; CO10005SBP; CO10005GDP; CO10005XXP; CO07505BKB; CO07505EBB;
 CO07505ORB; CO07505BGB; CO07505RBB; CO07505PPB; CO07505YWB;
 CO07505CGB; CO07505RDB; CO07505PKB; CO07505LMB; CO07505CBB;
 CO07505NBB; CO07505FGB; CO07505SBB; CO07505GDB; CO07505XXB;
 CO10005BKB; CO10005EBB; CO10005ORB; CO10005BGB; CO10005RBB;

CO10005PPB; CO10005YWB; CO10005CGB; CO10005RDB; CO10005PKB;
CO10005LMB; CO10005CBB; CO10005NBB; CO10005FGB; CO10005SBB;
CO10005GDB; CO10005XXB; CO2PK07509BKC; CO2PK07509EBC; CO2PK07509ORC;
CO2PK07509BGC; CO2PK07509RBC; CO2PK07509PPC; CO2PK07509YWC;
CO2PK07509CGC; CO2PK07509RDC; CO2PK07509PKC; CO2PK07509LMC;
CO2PK07509CBC; CO2PK07509NBC; CO2PK07509FGC; CO2PK07509SBC;
CO2PK07509GDC; CO2PK07509XXC.

Nº Notificação ANVISA: **80504540037**

Proibido reprocessar.

Prazo de Validade: 3 anos.

Embalagem: Unitária.

Pronto uso. Não estéril.

Fotos



Indicação de Uso/Finalidade

A Cohesive bandage é uma bandagem coesiva elástica, com qualidade de resistência superior e alongamento elástico de spandex. Um material de bandagem que irá aderir apenas a si mesmo e a nenhuma outra superfície, incluindo a pele. Pode ser usado em articulações ou músculos para uso geral ou para proteger curativos primários.

Modo de uso

1. Verifique se a pele está limpa e seca.
2. Pegue o rolo em uma mão e puxe a ponta com a outra mão.
3. Aplique na área afetada e enrole levemente ou estique bem. Ao enrolar a bandagem, ela se auto adesiva completando a ação.

Componentes e Composição

- Tecido não tecido; Spandex (poliuretano).
- Hipoalergênica e livre de látex

Condições de Armazenamento

Armazenar em condições ambiente.

Condições para o Transporte

Transportar em condições ambiente.

Condições de Manipulação

Não há condições especiais para manipulação do produto.

Advertências

Não aplicável.

Precauções

- Se a pele apresentar inflamação ou ferida aberta, evite aplicar diretamente nessa área.

- Se a pele formar uma erupção cutânea ou vermelhidão após a aplicação da fita, remova imediatamente e consulte um médico se persistir.

Contraindicações

Não é indicado para uso em crianças menores de 15 anos de idade.

Registrado por: BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA – Rua José Martins Fernandes (Pq Imigrantes), nº 601, Galpão 4, 5 e 6 – São Bernardo do Campo – SP CEP: 09843-400. Tel: (11) 4858-0252. E-mail: julio.tosti@brclog.com.br - CNPJ: 04.986.398/0001-38. AFE: 8.05.045-4. Responsável Técnico: Fabiana Veiga Morales - CRF SP: 68907.

Distribuidor: CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Rua Silva Bueno nº 1660 – cj. 1001 – Ipiranga – São Paulo – SP - CEP: 04208-001. Tel: (11)2305-4285 - E-mail: cedrsbrasil@gmail.com - CNPJ: 27.242.576/0001-11. AFE: 8.18.325-8 – Responsável Técnico: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN-SP: 039.294.

Fabricante Responsável: D3 New Zealand Limited - 226 Bush Road - Rosedale - 0632 - Auckland - Nova Zelândia.

rev. 00