

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Bandagem

Nome Comercial: **EAB Light RIP**

Modelos: EABL02569BKP; EABL02569WTP; EABL02569BGP; EABL02569BKS;
EABL02569WTS; EABL02569BGS; EABL05075BKR; EABL05075WTR; EABL05007WTP;
EABL05007BKP; EABL07507WTP; EABL07507BKP; EABL07570BKP; EABL07570WTP;
EABL10007WTP; EABL10007BKP; EABL10070BKP; EABL10070WTP; EABL05069BKP;
EABL05069WTP; EABL05069BGP; EABL05069BKS; EABL05069WTS; EABL05069BGS;
EABL07575BKR; EABL07575WTR; EABL07569BKP; EABL07569WTP; EABL07569BGP;
EABL07569BKS; EABL07569WTS; EABL07569BGS; EABL10069BKP; EABL10069WTP;
EABL10069BGP; EABL10069BKS; EABL10069WTS; EABL10069BGS.

Nº Notificação ANVISA: **80504540040**

Proibido reprocessar.

Prazo de Validade: 3 anos.

Embalagem: Unitária.

Pronto uso. Não estéril.

Fotos**Indicação de Uso/Finalidade**

A EAB Light RIP é uma fita usada para apoiar articulações, tecidos moles e imobilização.

Modo de uso

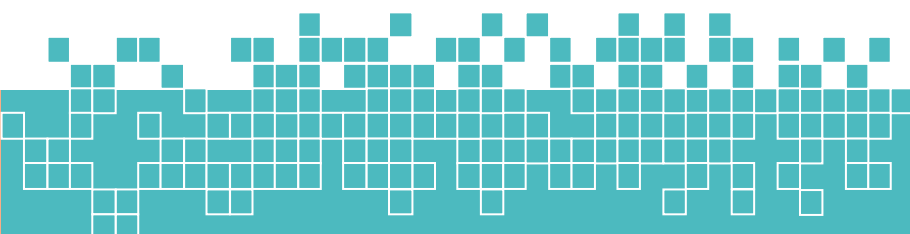
1. Antes de aplicar a fita, limpe a área da superfície que será amarrada.
2. Encontre a área e aplique a fita suavemente na área afetada.
3. Segure o rolo em uma mão e puxe a fita com a outra mão. Em seguida, aplique delicadamente a fita ao redor do ligamento.

Composição

- Algodão.
- Hipoalergênica e livre de látex.

Condições de Armazenamento

Armazenar em condições ambiente.

Condições para o Transporte

Transpotar em condições ambiente.

Condições de Manipulação

Não há condições especiais para manipulação do produto.

Advertências

Não aplicável.

Precauções

- Se a pele apresentar inflamação ou ferida aberta, evite aplicar diretamente nessa área.

- Se a pele formar uma erupção cutânea ou vermelhidão após a aplicação da fita, remova imediatamente e consulte um médico se persistir.

Contraindicações

Não é indicado para uso em crianças menores de 15 anos de idade.

Registrado por: BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA – Rua José Martins Fernandes (Pq Imigrantes), nº 601, Galpão 4, 5 e 6 – São Bernardo do Campo – SP CEP: 09843-400. Tel: (11) 4858-0252. E-mail: julio.tosti@brclog.com.br - CNPJ: 04.986.398/0001-38. AFE: 8.05.045-4. Responsável Técnico: Fabiana Veiga Morales - CRF SP: 68907.

Distribuidor: CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Rua Silva Bueno nº 1660 – cj. 1001 – Ipiranga – São Paulo – SP - CEP: 04208-001. Tel: (11)2305-4285 - E-mail: cedrsbrasil@gmail.com - CNPJ: 27.242.576/0001-11. AFE: 8.18.325-8 – Responsável Técnico: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN-SP: 039.294.

Fabricante Responsável: D3 New Zealand Limited - 226 Bush Road - Rosedale - 0632 - Auckland - Nova Zelândia.