

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Bandagem

Nome Comercial: **Kinesiology Tape**

Modelos: KTC02506BKS; KTC02506EBS; KTC02506RBS; KTC02506BGS; KTC02506RDS;
KTC02506WTS; KTC02506LMS; KTC02506ORS; KTC02506PPS; KTC02506YWS; KTC02506SVS;
KTC02506PKS; KTC02506XXS; KTC05060BKR; KTC05060EBR; KTC05060LMR; KTC05060BGR;
KTC05060PKR; KTC05006BKR; KTC05006EBR; KTC05006RBR; KTC05006BGR; KTC05006RDR;
KTC05006WTR; KTC05006LMR; KTC05006ORR; KTC05006PPR; KTC05006YWR;
KTC05006SVR; KTC05006PKR; KTC05006XXR; KTC05006BKC; KTC05006EBC; KTC05006RBC;
KTC05006BGC; KTC05006RDC; KTC05006WTC; KTC05006LMC; KTC05006ORC; KTC05006PPC;
KTC05006YWC; KTC05006SVC; KTC05006PKC; KTC05006XXC; KTC05006BKS; KTC05006EBS;
KTC05006RBS; KTC05006BGS; KTC05006RDS; KTC05006WTS; KTC05006LMS; KTC05006ORS;
KTC05006PPS; KTC05006YWS; KTC05006SVS; KTC05006PKS; KTC05006XXS; KTC05006BKB;
KTC05006EBB; KTC05006RBB; KTC05006BGB; KTC05006RDB; KTC05006WTB; KTC05006LMB;
KTC05006ORB; KTC05006PPB; KTC05006YWB; KTC05006SVB; KTC05006PKB; KTC05006XXB;
KTC05035BKC; KTC05035EBC; KTC05035RBC; KTC05035BGC; KTC05035RDC; KTC05035WTC;
KTC05035XXC; KTC05005BKB; KTC05005EBB; KTC05005RBB; KTC05005BGB; KTC05005RDB;
KTC05005WTB; KTC05005LMB; KTC05005ORB; KTC05005PPB; KTC05005YWB; KTC05005SVB;
KTC05005PKB; KTC05005XXB; KTC07506BKR; KTC07506EBR; KTC07506RBR; KTC07506BGR;
KTC07506RDR; KTC07506WTR; KTC07506LMR; KTC07506ORR; KTC07506PPR; KTC07506YWR;
KTC07506SVR; KTC07506PKR; KTC07506XXR; KTC07506BKC; KTC07506EBC; KTC07506RBC;
KTC07506BGC; KTC07506RDC; KTC07506WTC; KTC07506LMC; KTC07506ORC; KTC07506PPC;
KTC07506YWC; KTC07506SVC; KTC07506PKC; KTC07506XXC; KTC07506BKS; KTC07506EBS;
KTC07506RBS; KTC07506BGS; KTC07506RDS; KTC07506WTS; KTC07506LMS; KTC07506ORS;
KTC07506PPS; KTC07506YWS; KTC07506SVS; KTC07506PKS; KTC07506XXS; KTC07506BKB;
KTC07506EBB; KTC07506RBB; KTC07506BGB; KTC07506RDB; KTC07506WTB; KTC07506LMB;
KTC07506ORB; KTC07506PPB; KTC07506YWB; KTC07506SVB; KTC07506PKB; KTC07506XXB;
KTC2PK07506BKR; KTC2PK07506EBR; KTC2PK07506RBR; KTC2PK07506BGR;
KTC2PK07506RDR; KTC2PK07506WTR; KTC2PK07506LMR; KTC2PK07506ORR;
KTC2PK07506PPR; KTC2PK07506YWR; KTC2PK07506SVR; KTC2PK07506PKR;
KTC2PK07506XXR.

Nº Notificação ANVISA: **80504540034**

Proibido reprocessar.

Prazo de Validade: 3 anos.

Embalagem: Unitária.

Pronto uso. Não estéril.

Fotos**Indicação de Uso/Finalidade**

Os profissionais usarão a Kinesiology Tape para ajudar a beneficiar seus pacientes com uma ampla variedade de lesões de esporte e músculo-esqueléticas, além de condições inflamatórias. A Kinesiology Tape também pode ser usada no tratamento de fascite plantar, dores nas canelas e cotovelo de tenista.

Modo de uso

Verifique se a pele está limpa e seca.

Remova 5 cm de papel de apoio do final da Kinesiology Tape e aplique.

Como alternativa, corte o comprimento necessário.

Rasgue o papel de apoio no meio da Kinesiology Tape e retire.

Estique a Kinesiology Tape e aplique na área afetada, prenda os últimos 5 cm sem esticar.

Componentes e Composição

- Algodão elástico premium; Adesivo acrílico.

- Hipoalergênica e livre de látex

Condições de Armazenamento

Armazenar em condições ambiente.

Condições para o Transporte

Transportar em condições ambiente.

Condições de Manipulação

Não há condições especiais para manipulação do produto.

Advertências

Não aplicável.

Precauções

Se a pele apresentar inflamação ou ferida aberta, evite colocar a fita diretamente nessa área.

Se a pele formar uma erupção cutânea ou vermelhidão após a aplicação da fita, remova imediatamente e consulte um médico se persistir.

Contraindicações

Não aplicável.

Registrado por: BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA – Rua José Martins Fernandes (Pq Imigrantes), nº 601, Galpão 4, 5 e 6 – São Bernardo do Campo – SP CEP: 09843-400. Tel: (11) 4858-0252. E-mail: julio.tosti@brclg.com.br - CNPJ: 04.986.398/0001-38. AFE: 8.05.045-4. Responsável Técnico: Fabiana Veiga Morales - CRF SP: 68907.

Distribuidor: CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Rua Silva Bueno nº 1660 – cj. 1001 – Ipiranga – São Paulo – SP - CEP: 04208-001. Tel: (11)2305-4285 - E-mail: cedrsbrasil@gmail.com - CNPJ: 27.242.576/0001-11. AFE: 8.18.325-8 – Responsável Técnico: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN-SP: 039.294.

Fabricante Responsável: D3 New Zealand Limited - 226 Bush Road - Rosedale - 0632 - Auckland - Nova Zelândia.

rev. 00