

**Identificação do produto e Apresentação**

Nome Técnico: Bandagem

Nome Comercial: **Rigid Strapping Tape**

Modelos: RG025137FLL; RG02515FLL; RG02510FLL; RGL025137WTL; RGL02515WTL; RGL02510WTL; RG038137FLL; RGL038137WTL; RG03810FLL; RGL03810WTL; RG03815FLL; RGL03815WTL; RG038137FLS; RGL038137WTS; RG03810FLS; RGL03810WTS; RG03815FLS; RGL03815WTS; RG050137FLL; RGL050137WTL; RG05010FLL; RGL05010WTL; RG05015FLL; RG03815FLR; RG03815FLC; RGL03815WTR; RGL03815WTC; RG038137FLR; RG038137FLC; RGL038137WTR; RGL038137WTC; RG2PK38137FLR; RG2PK38137FLC; RG6PK38137FLR; RG6PK38137FLC.

Nº Notificação ANVISA: **80504540036**

Proibido reprocessar.

Prazo de Validade: 3 anos.

Embalagem: Unitária.

Pronto uso. Não estéril.

**Fotos****Indicação de Uso/Finalidade**

A Rigid Strapping Tape é adequada para ser aplicada em todas as articulações (tornozelos, joelhos, ombros e cotovelos). Recomenda-se o uso desde produto onde uma fita de extra forte é necessária para apoiar totalmente as articulações sob alto estresse, minimizando assim a atividade excessiva das articulações que pode causar lesões. Especialmente indicada para esportes de alto impacto e contato. Altamente adesivas.

**Modo de uso**

Antes de aplicar a Rigid Strapping Tape, limpe a área da superfície que será aplicada.

Encontre a área e aplique a Rigid Strapping Tape suavemente na área afetada.

Segure o rolo em uma mão e puxe a Rigid Strapping Tape com a outra mão, em seguida, aplique com cuidado.

Para remover, puxe a Rigid Strapping Tape, enquanto pressiona suavemente a pele para baixo.

**Componentes e Composição**

- Algodão Rayon Premium; Adesivo premium de óxido de zinco.

- Hipoalergênica e livre de látex

### Condições de Armazenamento

Armazenar em condições ambiente.

### Condições para o Transporte

Transportar em condições ambiente.

### Condições de Manipulação

Não há condições especiais para manipulação do produto.

### Advertências

Não aplicável.

### Precauções

Se a pele formar uma erupção cutânea ou vermelhidão após a aplicação da fita, retire imediatamente e consulte um médico se persistir.

### Contraindicações

Não é indicado para uso em crianças menores de 15 anos de idade.

**Registrado por:** BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA – Rua José Martins Fernandes (Pq Imigrantes), nº 601, Galpão 4, 5 e 6 – São Bernardo do Campo – SP CEP: 09843-400. Tel: (11) 4858-0252. E-mail: [julio.tosti@brclg.com.br](mailto:julio.tosti@brclg.com.br) - CNPJ: 04.986.398/0001-38. AFE: 8.05.045-4. Responsável Técnico: Fabiana Veiga Morales - CRF SP: 68907.

**Distribuidor:** CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Rua Silva Bueno nº 1660 – cj. 1001 – Ipiranga – São Paulo – SP - CEP: 04208-001. Tel: (11)2305-4285 - E-mail: [cedrsbrasil@gmail.com](mailto:cedrsbrasil@gmail.com) - CNPJ: 27.242.576/0001-11. AFE: 8.18.325-8 – Responsável Técnico: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN-SP: 039.294.

**Fabricante Responsável:** D3 New Zealand Limited - 226 Bush Road - Rosedale - 0632 - Auckland - Nova Zelândia.